



# Produktübersicht

Stand: April 2023

## LEGENDE

### Wundart



oberflächliche Wunde



tiefe Wunde

### Wundstadium



nekrotische Wunde



fibrinös / belegte Wunde



granulierende Wunde



epithelisierende Wunde

### Exsudationsmenge



schwache Exsudation



mäßige Exsudation



starke Exsudation

### Produkttyp

**PV**

Primärverband

**SV**

Sekundärverband

**WF**

Wundfüller

Vertrieb durch:  
Management AG für  
Integrierte Versorgung  
Aidenbachstraße 52a  
81379 München  
Tel: 089-75075592  
Fax: 089-75505689  
[www.miv-ag.de](http://www.miv-ag.de)  
[info@miv-ag.de](mailto:info@miv-ag.de)

Hersteller:  
TRIGOCare International GmbH  
In den Wiesen 3  
51674 Wiehl - Germany  
[www.trigocare.com](http://www.trigocare.com)

Alle Rechte vorbehalten. Keine Vervielfältigung und Nutzung von Print- oder Bildmaterial ohne Genehmigung der TRIGOCare International GmbH. TRIGOCare International GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die TRIGOCare International GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Ausgabestand: 04/2023

©TRIGOCare International GmbH 2009-2020

## INHALTSVERZEICHNIS:

|  |    |
|--|----|
| <b>Übersicht Wundversorgung</b>          | 4  |
| TRIGO PHMB                               | 5  |
| TRIGOpad aqua / TRIGOpad aqua comfort    | 6  |
| TRIGOtüll komb / TRIGOtüll komb adhesive | 7  |
| TRIGO Superabsorber                      | 8  |
| TRIGOcolloid foam                        | 9  |
| TRIGOcolloid thin / TRIGOcolloid comfort | 10 |
| TRIGOfilm                                | 11 |
| Gezielt aktiv werden                     | 12 |
| <br>                                     |    |
| <b>Übersicht Binden</b>                  | 13 |
| Kohäsive Binden                          | 14 |
| Klebebinden                              | 15 |
| Zinkleimbinden                           | 16 |
| Elastische Fixierbinden                  | 17 |
| Langzugbinde / Kurzzugbinde              | 18 |
| Schlauchbandagen                         | 19 |

**Der Patient an erster Stelle** bedeutet für uns, auf den Patienten optimierte Wundbehandlungen mit einem sorgfältig entwickelten Produktsortiment anzubieten. Wir beachten die Bedürfnisse der Patienten und alle begleitenden Umstände, mit dem Ziel effiziente und erfolgreiche Therapien zu gewährleisten. Effektive Produkte, die ein ideal-feuchtes Wundmilieu fördern, sind entscheidend diese Zielsetzung zu erreichen.

Diese multidisziplinäre Aufgabe ist nicht nur eine medizinische und pflegerische Herausforderung, sondern auch der Anspruch die Kosteneffizienz zu verbessern. Effektive Produkte auszuwählen hilft Behandlungszeiten zu verkürzen, Kosten zu senken und trägt damit auch zu einer höheren Lebensqualität für Patienten und deren Familien bei.

TRIGOCare International GmbH wurde 2010 von der miro Verbandstoffe GmbH gegründet und hat im Bereich der Modernen Wundversorgung eine herausragende Produktauswahl für Prävention, Behandlung und Heilung etabliert. Auf Diabetes und chronische Wunden fokussiert, entwickeln wir effektive und hochwertige Lösungen für unsere Patienten weltweit. Ein Team aus internationalen Experten stellt die Basis für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ebenso wie für die Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Produkte.

Qualitativ hochwertige Wundversorgung, hohe Standards  
und Kundenorientierung sind unsere Berufung.

## Moderne Wundversorgung auf einen Blick!


| Art-N°  | Bezeichnung                         | VE       | PZN      |
|---|-------------------------------------|----------|----------|
| Sterile, feuchte Vlieswundauflage mit PHMB    |                                     |          |          |
| 19010   | TRIGO PHMB 10cm x 10cm              | 10 Stück | 04906430 |
| 19050   | TRIGO PHMB 10cm x 10cm              | 50 Stück | 04906542 |
| Transparente Hydrogelaufgabe                  |                                     |          |          |
| 11010   | TRIGOpad aqua 10cm x 10cm           | 10 Stück | 09945423 |
| 11020   | TRIGOpad aqua 10cm x 10cm           | 20 Stück | 09945446 |
| 11050   | TRIGOpad aqua 10cm x 10cm           | 50 Stück | 04714423 |
| 11030   | TRIGOpad aqua comfort 68mm x 43mm   | 50 Stück | 17864207 |
| Saugfähiger Lipocolloid Verband               |                                     |          |          |
| 13010   | TRIGOtüll komb 10cm x 10cm          | 10 Stück | 13417204 |
| 13050   | TRIGOtüll komb 10cm x 10cm          | 50 Stück | 13417210 |
| Saugfähiger Lipocolloid Verband mit Kleberand |                                     |          |          |
| 13109   | TRIGOtüll komb adhesive 10cm x 10cm | 50 Stück | 15250079 |
| 13110   | TRIGOtüll komb adhesive 15cm x 15cm | 10 Stück | 14135519 |
| 13150   | TRIGOtüll komb adhesive 15cm x 15cm | 50 Stück | 14262318 |

| Art-N°   | Bezeichnung                      | VE       | PZN      |
|--|----------------------------------|----------|----------|
| Super absorbierender Wundverband                         |                                  |          |          |
| 12050  | TRIGO Superabsorber 10cm x 10cm  | 25 Stück | 18713195 |
| 12051  | TRIGO Superabsorber 10cm x 20cm  | 25 Stück | 18713203 |
| 12052  | TRIGO Superabsorber 20cm x 30cm  | 25 Stück | 18713226 |
| Selbstklebender Hydrokolloid-Schaumverband               |                                  |          |          |
| 14102  | TRIGOcolloid foam 10cm x 10cm    | 10 Stück | 09944903 |
| Hydrocolloide Wundauflage                                |                                  |          |          |
| 15002  | TRIGOcolloid thin 10cm x 10cm    | 10 Stück | 09944926 |
| 15052  | TRIGOcolloid thin 10cm x 10cm    | 50 Stück | 10383232 |
| 15005  | TRIGOcolloid comfort 68mm x 43mm | 50 Stück | 17864236 |
| Steriler, transparenter Wundschnellverband von der Rolle |                                  |          |          |
| 16020  | TRIGOfilm Rolle 10m x 5cm        | 1 Stück  | 09945073 |
| 16021  | TRIGOfilm Rolle 10m x 10cm       | 1 Stück  | 09945050 |
| 16022  | TRIGOfilm Rolle 10m x 15cm       | 1 Stück  | 09945067 |



# TRIGO PHMB

sterile, feuchte Vlieswundauflage mit Polyhexanid (PHMB)

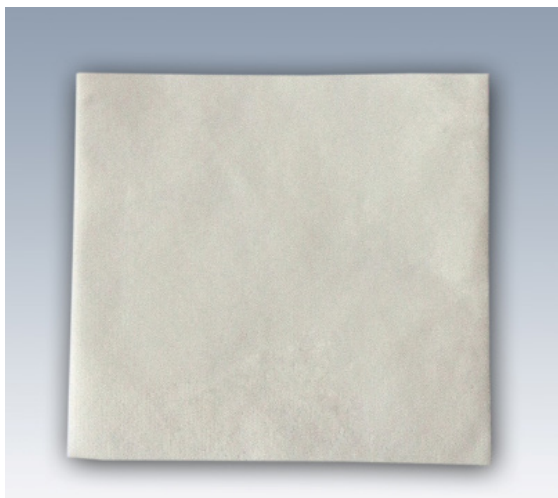

TRIGO PHMB ist eine sterile, feuchte Vlieswundauflage mit Polyhexanid (PHMB). Die Lösung dient der Dekontamination und Infektionsprophylaxe gegen Mikroorganismen und schützt vorbeugend gegen bakterielle und fungale Pathogene bei akuten und chronischen Wunden. Die besonders wirksame Kombination der Inhaltsstoffe von TRIGO PHMB löst den Biofilm, reinigt die Wunde und schafft ein optimales Wundmilieu zur Neubildung von Granulationsgewebe. Muss mit einem Sekundärverband fixiert werden.

## Vorteile von TRIGO PHMB

- Dekontamination und Infektionsprophylaxe gegen Mikroorganismen
- vorbeugend gegen bakterielle und fungale Pathogene bei akuten und chronischen Wunden
- löst den Biofilm
- Verhindert die Vermehrung von Keimen und Bakterien

## Kontraindikationen:

- Das Produkt darf nur bei Hautwunden oder Schleimhautwunden eingesetzt werden
- Nichtverwendung bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe
- Nichtverwendung bei freiliegender Knochenhaut oder Knorpelgewebe
- Bei Babies und Schwangeren: Anwendung nur nach ärztlicher Rücksprache

## Anwendungsgebiete:



akute und chronische Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko:

- Postoperative Wunden
- Ulcus Cruris (Unterschenkelgeschwür)
- Oberflächliche und tiefe Wunden
- Diabetisches Fußsyndrom
- Verbrennungen bis 2. Grades
- Dekubitus bis Grad 3

## Bestellinfos



| Art-N° | Größe      | VE        | PZN      |
|--------|------------|-----------|----------|
| 19010  | 10 x 10 cm | 10 St.    | 04906430 |
| 19050  | 10 x 10 cm | 5x 10 St. | 04906542 |

## Anwendungshinweise

| Wundart   | Wundstadium   | Exsudation   | Produkttyp |
|---|---|--|------------|
|  |  |  | <b>PV</b>  |

# TRIGOpad aqua / TRIGOpad aqua comfort

## transparente Hydrogelaufgabe

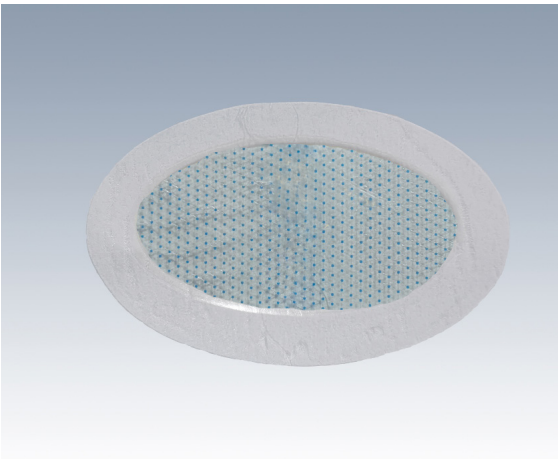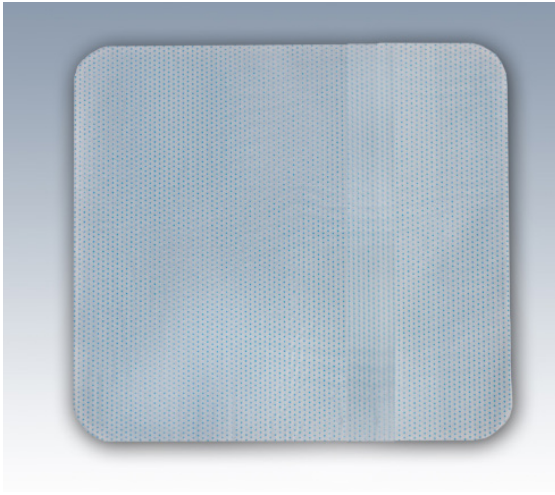

TRIGOpad aqua ist ein transparenter Hydrogelverband aus einem PU-Gel (60% Wasseranteil) mit einer gasdurchlässigen, aber flüssigkeits- und keimdichten Deckschicht aus Polyurethan. Das Gel kann sowohl Feuchtigkeit abgeben als auch Sekret aufnehmen. Hierdurch entsteht ein feuchtes Wundmilieu, das den natürlichen Wundheilungsprozess fördert.

TRIGOpad aqua verklebt nicht mit der Wunde und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Der Wundverband ist transparent und ermöglicht somit die Beobachtung der Wunde ohne Verbandwechsel.

TRIGOpad aqua comfort hat einen selbstklebenden Rand, TRIGOpad aqua muss mit einem Sekundärverband fixiert werden.

### Bestellinfos TRIGOpad aqua

| Art-N° | Größe     | VE     | PZN      |
|--------|-----------|--------|----------|
| 11010  | 10 x 10cm | 10 St. | 09945423 |
| 11020  | 10 x 10cm | 20 St. | 09945446 |
| 11050  | 10 x 10cm | 50 St. | 04714423 |

### Bestellinfos TRIGOpad aqua comfort

| Art-N° | Größe     | VE     | PZN      |
|--------|-----------|--------|----------|
| 11030  | 68 x 43mm | 50 St. | 17864207 |

### Anwendungsgebiete:

- oberflächliche Wunden in der Granulations- oder Epithelisierungsphase
- Wunden mit wenig oder keiner Exsudation
- Verbrennungen bis 2. Grades
- geeignet für Debridement




### Kontraindikationen:

- Verbrennungen 3. Grades
- stark exsudierende Wunden
- infizierte Wunden

### Vorteile von TRIGOpad aqua Produkten:



- gibt Feuchtigkeit an die Wunde ab, bei gleichzeitiger Aufnahme von Exsudat
- geeignet für Wunddebridement
- verklebt nicht mit der Wunde
- ideal-feuchtes Wundmilieu
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase

### Anwendungshinweise

| Wundart   | Wundstadium   | Exsudation  | Produkttyp |
|---|---|---|------------|
|  |  |  | <b>PV</b>  |

# TRIGOtüll komb / TRIGOtüll komb adhesive

## Saugfähiger Lipocolloid Verband

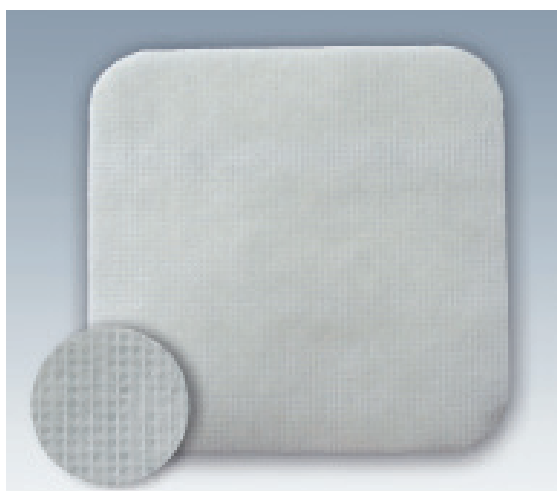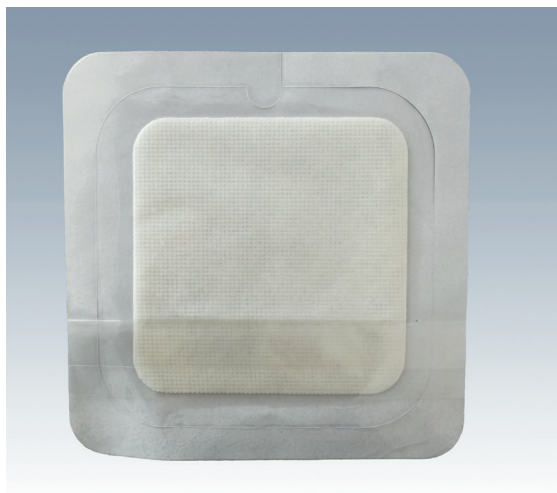

### Anwendungsgebiete:

TRIGOtüll komb Produkte sind geeignet für schwach bis mäßig exsudierende Wunden, z.B.:

- Verbrennungen
- Traumatische Wunden
- Schürfwunden
- Post-operative Wunden
- Beingeschwüre
- Druckgeschwüre
- Diabetische Fußgeschwüre
- Epidermolysis bullosa

### Kontraindikationen:

- Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe

Die TRIGOtüll komb Produkte bestehen aus einem saugfähigen Polyestergewebe welches mit einer nicht haftenden Lipokolloid-Wundkontaktschicht beschichtet ist. Das enthaltene Hydrokolloid sorgt dafür, dass bei Kontakt mit Feuchtigkeit ein weiches Gel entsteht, welches die Wundumgebung feucht hält, die Wundheilung fördert und ein Verkleben mit der Wundaufgabe verhindert. Das Polyestergewebe nimmt überschüssiges Exsudat schnell und sicher auf. Das Exsudat wird somit gezielt von der Wunde weggeleitet, ohne die Wunde auszutrocknen. Die Mazerationsgefahr kann deutlich minimiert werden. Die TRIGOtüll komb Produkte machen das Exsudatmanagement einfach und anwenderfreundlich bei gleichzeitigem hohem Patientenkomfort.

TRIGOtüll komb adhesive hat einen selbstklebenden, transparenten Rand, wohingegen TRIGOtüll komb mit einem adäquaten Sekundärverband fixiert werden muss.

### Vorteile von TRIGOtüll komb Produkten:

- Kombiniert die positiven Charakteristiken eines Hydrokolloids mit den Vorteilen einer absorbierenden Wundaufgabe
- Schafft ideal feuchte Wundverhältnisse
- Atraumatische Verbandwechsel
- Verklebt nicht mit der Wunde

### Bestellinfos TRIGOtüll komb

| Art-N° | Größe     | VE     | PZN      |
|--------|-----------|--------|----------|
| 13010  | 10 x 10cm | 10 St. | 13417204 |
| 13050  | 10 x 10cm | 50 St. | 13417210 |

### Bestellinfos TRIGOtüll komb adh.



| Art-N° | Größe     | Größe Komresse | VE     | PZN      |
|--------|-----------|----------------|--------|----------|
| 13109  | 10 x 10cm | 7 x 7cm        | 50 St. | 15250079 |
| 13110  | 15 x 15cm | 10 x 10cm      | 10 St. | 14135519 |
| 13150  | 15 x 15cm | 10 x 10cm      | 50 St. | 14262318 |

### Anwendungshinweise

| Wundart | Wundstadium | Exsudation | Produkttyp |
|---------|-------------|------------|------------|
|         |             |            | <b>PV</b>  |

# TRIGO Superabsorber

## superabsorbierender Wundverband

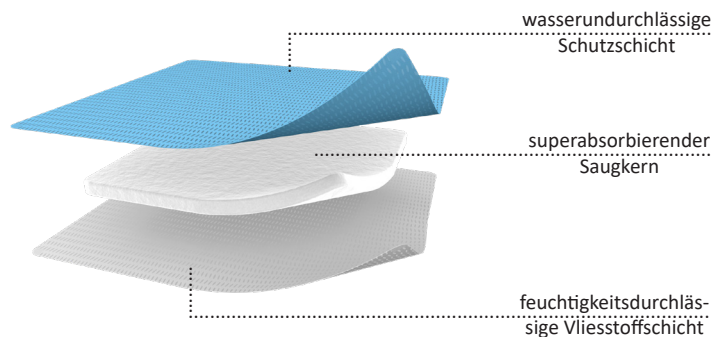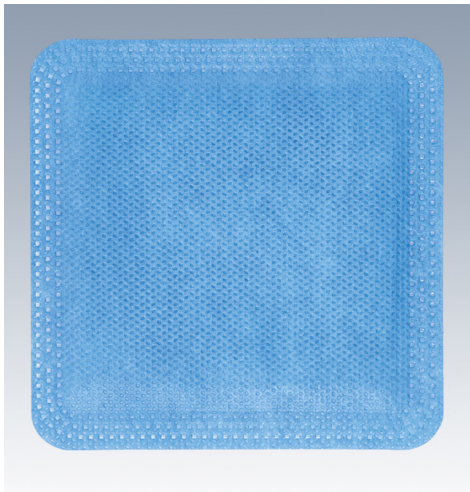

### Anwendungsgebiete:

- mäßig bis stark exsudierende Wunden
- Beingeschwüre
- Druckgeschwüre
- Diabetische Fußgeschwüre
- Dehisierte chirurgische Wunden

### Kontraindikationen:

- Nicht anwenden bei Patienten mit bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegen das Produkt oder einen seiner Bestandteile
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf trockenen oder wenig exsudierenden Wunden, Schleimhäuten oder Augen
- nicht in Wundhöhlen verwenden, da der Verband während der Absorption anschwillt
- Nicht bei Verbrennungen dritten Grades verwenden

TRIGO Superabsorber ist eine dreilagige, sterile Wundauflage, die aus einer luftdurchlässigen, wasserdichten Vliesstoffschicht, einem superabsorbierenden Saugkern und einer hydrodurchlässigen Vliesstoffschicht besteht. Die Wundauflage hält die Wundumgebung feucht, was wiederum den natürlichen Wundheilungsprozess fördert. Wundexsudat wird von der Wunde weggeleitet und sicher in der absorbierenden Schicht gehalten. Das Risiko einer Mazeration und Schädigung der Haut in der Wundumgebung wird minimiert. Der Verband muss mit einem Sekundärverband fixiert werden.

### Vorteile von TRIGO Superabsorber:

- hohe Aufnahmekapazität und sicherer Einschluss des Wundexsudats
- minimiert das Risiko von Mazeration
- äußere Schicht ist undurchlässig für Bakterien oder Feuchtigkeit
- schafft ein feuchtes Wundmilieu
- kann auch im Rahmen einer Kompressionstherapie verwendet werden

### Bestellinfos TRIGO Superabsorber

| Art-N° | Größe     | VE     | PZN      |
|--------|-----------|--------|----------|
| 12050  | 10 x 10cm | 25 St. | 18713195 |
| 12051  | 20 x 10cm | 25 St. | 18713203 |
| 12052  | 30 x 20cm | 25 St. | 18713226 |


### Anwendungshinweise

| Wundart | Wundstadium | Exsudation | Produkttyp    |
|---------|-------------|------------|---------------|
|         |             |            | <b>PV, SV</b> |



# TRIGOcolloid foam

## selbstklebender Hydrocolloid-Schaumverband

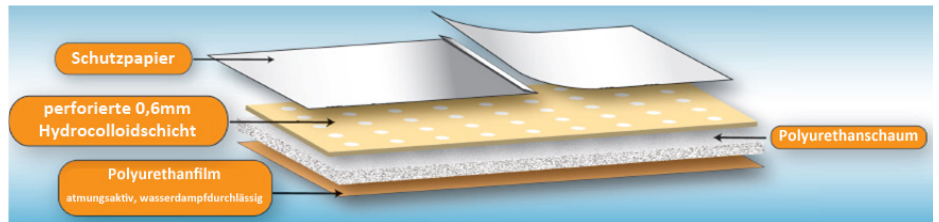

TRIGOcolloid foam ist ein selbstklebender Hydrocolloidverband mit einer Schicht aus PU-Schaum. Die darunterliegende Hydrocolloidschicht ist perforiert, dies ermöglicht dem PU-Schaum eine schnelle Aufnahme des überflüssigen Exsudats, wodurch Mazerationen weitestgehend vorgebeugt werden können.

TRIGOcolloid foam erleichtert das Exsudatmanagement und macht es anwenderfreundlich bei gleichzeitig hohem Patientenkomfort.

Die Hydrocolloid-Matrix verwandelt sich bei Kontakt mit Wundexsudat in ein weiches Gel, welches gerade bei wenig nässenden Wunden ein ideal-feuchtes Wundmilieu aufrecht erhalten kann und somit eine schnellere Wundheilung unterstützt.

### Vorteile von TRIGOcolloid foam:

- kombiniert die positiven Eigenschaften einer Hydrocolloidaufgabe mit den Produktvorteilen eines Schaumverbandes
- gutes Absorptionsvermögen
- verklebt nicht mit der Wunde
- atraumatischer Verbandwechsel
- ideal-feuchtes Wundmilieu
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase
- geringe Mazerationsgefahr durch ein hervorragendes Exsudatmanagement

### Anwendungsgebiete:

- leicht bis mäßig exsudierende Wunden
- Dekubitus
- Ulcus Cruris verschiedenen Ursprungs
- Diabetische Fußsyndrom
- postoperative Wunden
- Spalthautentnahmestellen
- Hautabschürfungen
- Verbrennungen bis 2. Grades

### Bestellinfos

| Art-N° | Größe     | VE     | PZN      |
|--------|-----------|--------|----------|
| 14102  | 10 x 10cm | 10 St. | 09944903 |

### Kontraindikationen:



- im Bereich freiliegender Muskeln, Knochen und Sehnen
- Verbrennungen 3. Grades
- infizierte Wunden
- trockene Wunden

### Anwendungshinweise

| Wundart | Wundstadium | Exsudation | Produkttyp    |
|---------|-------------|------------|---------------|
|         |             |            | <b>PV, SV</b> |

# TRIGOcolloid thin / TRIGOcolloid comfort

## hydrokolloide Wundauflage

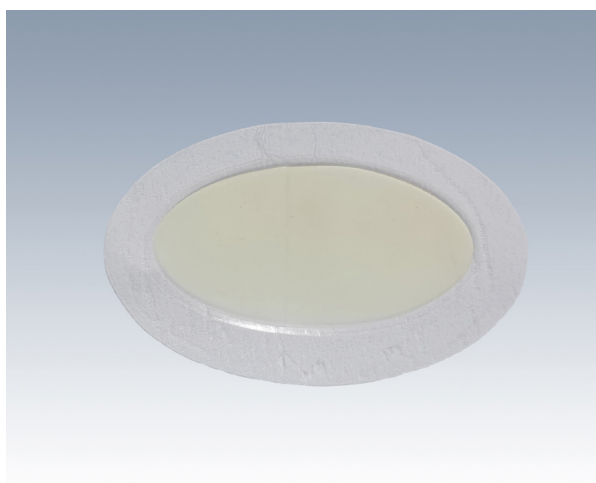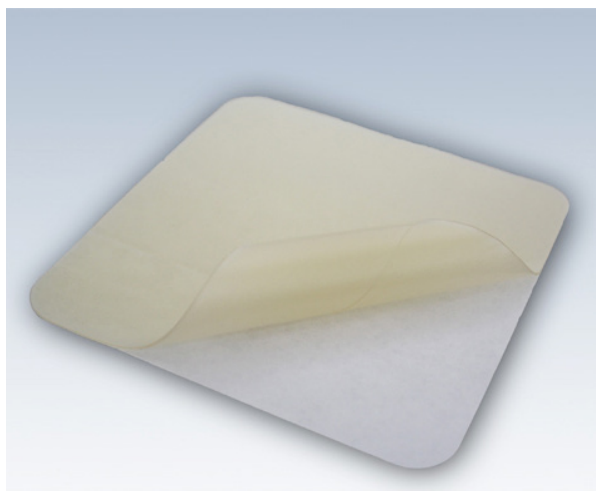

Die TRIGOcolloid Produkte sind hydroaktive, sterile, selbstklebende Wundauflagen zur feuchten Wundbehandlung. Die Wundauflagen erhalten ein ideal-feuchtes Wundmilieu, das die physiologischen Heilungsprozesse fördert. Sie sind durchlässig für Gase jedoch nicht für Flüssigkeiten und Bakterien. Durch die Gelbildung bei Kontakt mit Wundexsudat ermöglichen beide Wundauflagen einen atraumatischen Verbandwechsel.

TRIGOcolloid thin ist sehr gut modellierbar und durch die hohe Flexibilität gerade im Gelenkbereich und an exponierten Stellen besonders gut anwendbar. Durch die geringe Stärke (ca. 0,6mm) ist zudem eine gute Beobachtung der Wunde möglich.

### Bestellinfos TRIGOcolloid thin

| Art-N° | Größe     | VE     | PZN      |
|--------|-----------|--------|----------|
| 15002  | 10 x 10cm | 10 St. | 09944926 |
| 15052  | 10 x 10cm | 50 St. | 10383232 |

### Bestellinfos TRIGOcolloid comfort

| Art-N° | Größe     | VE     | PZN      |
|--------|-----------|--------|----------|
| 15005  | 68 x 43mm | 50 St. | 17864236 |

### Anwendungsgebiete:

- mehr oder weniger tiefe Hautgeschwüre
- Druck-, Bein- oder diabetische Geschwüre
- Hautentnahmestellen / -transplantationen
- postoperative Verbände zum Schutz der Naht
- Schutz von empfindlicher Haut
- Hautabschürfungen, oberflächliche Wunden
- Verbrennungen bis 2. Grades
- Stomawunden (als Hautschutz)
- Windelausschlag bei Säuglingen

### Kontraindikationen:

- Nicht anzuwenden bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegen das Produkt oder einen seiner Bestandteile, insbesondere Polyisobutene und Carboxymethylcellulose.

### Vorteile von TRIGOcolloid Produkten:

- verkleben nicht mit der Wunde
- ideal-feuchtes Wundmilieu
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase
- selbstklebend
- leicht transparent (erleichtert die Wundbeobachtung)

### Anwendungshinweise

| Wundart | Wundstadium | Exsudation | Produkttyp |
|---------|-------------|------------|------------|
|         |             |            | <b>PV</b>  |

# TRIGOfilm Rolle

## transparenter Wundschnellverband



TRIGOfilm ist ein wasserdichter Wundverband mit einer Beschichtung aus hautfreundlichem Acrylatkleber. Der Wundverband ist transparent und ermöglicht somit die Beobachtung der Wunde ohne Verbandwechsel. TRIGOfilm ist durchlässig für Gase, aber nicht für Flüssigkeiten und Bakterien. Eine Rastereinteilung erleichtert den individuellen Zuschnitt.




### Anwendungsgebiete:

- als Primärverband für oberflächliche, trockene Wunden (z.B. Abschürfungen, leichte Verbrennungen)
- Fixierung von Kathetern oder Kanülen
- Sekundärfixierung von Wundverbänden (z.B. TRIGOpad aqua, TRIGO PHMB)

### Bestellinfos TRIGOfilm Rolle

| Art-N° | Größe      | VE    | PZN      |
|--------|------------|-------|----------|
| 16020  | 10m x 5cm  | 1 St. | 09945073 |
| 16021  | 10m x 10cm | 1 St. | 09945050 |
| 16022  | 10m x 15cm | 1 St. | 09945067 |

### Anwendungshinweise

| Wundart   | Wundstadium   | Exsudation  | Produkttyp    |
|---|---|---|---------------|
|  |  |  | <b>PV, SV</b> |

# Gezielt aktiv werden



| Produkte  | TRIGO PHMB             | TRIGOPad aqua | TRIGOtüll komb/<br>TRIGOtüll komb<br>adhesive | TRIGO Super-<br>absorber | TRIGOcolloid<br>foam | TRIGOcolloid<br>thin | TRIGOfilm Rolle   |
|---|------------------------|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   |                        |               |   |                          |                      |                      |   |
| <b>Wundstadium</b><br>nekrotische Wunde<br>fibrinöse Wunde<br>granulierende Wunde<br>epithelisierende Wunde |                        |               |   |                          |                      |                      |   |
| <b>Wundtiefe</b><br>= tief<br>= oberflächlich   |                        |               |   |                          |                      |                      |   |
| <b>Exsudationsgrad</b><br>schwach<br>mittel<br>stark  |                        |               |   |                          |                      |                      |   |
| <b>Sekundärverband erforderlich</b>   |                        |               |   |                          |                      |                      |   |
| <b>Möglichkeiten der Kombination</b>  | TRIGOfoam<br>TRIGOfilm | TRIGOfilm     | TRIGOfilm                                     | TRIGOfilm                | TRIGO PHMB           |                      | TRIGOPad aqua<br>TRIGOtüll komb<br>TRIGO PHMB<br>TRIGO Superab-<br>sorber |
| <b>Primär-/<br/>Sekundärverband</b>   | PV                     | PV            | PV  | PV, SV                   | PV, SV               | PV                   | PV, SV  |

## Alle Binden auf einen Blick!


| Art-N°  | Bezeichnung                         | VE       | PZN      |
|---|-------------------------------------|----------|----------|
| <b>Kohäsive Universal-Kompressionsbinde</b>                 |                                     |          |          |
| 52702   | TRIGO RS-TK blau 2,5m x 5cm         | 10 Stück | 17514737 |
| 52705   | TRIGO RS-TK blau 4,5m x 5cm         | 10 Stück | 11192362 |
| 52708   | TRIGO RS-TK blau 4,5m x 7,5cm       | 10 Stück | 10818339 |
| 52710   | TRIGO RS-TK blau 4,5m x 10cm        | 10 Stück | 10818351 |
| 52008   | TRIGO RS-TK rot 4,5m x 7,5cm        | 10 Stück | 10818233 |
| 52010   | TRIGO RS-TK rot 4,5m x 10cm         | 10 Stück | 10818285 |
| <b>Kohäsive, elastische Fixierbinde mit feiner Struktur</b> |                                     |          |          |
| 60001   | TRIGOmull haft fein weiß 20m x 6cm  | 6 Stück  | 00049472 |
| 60002   | TRIGOmull haft fein weiß 20m x 8cm  | 6 Stück  | 00049489 |
| 60003   | TRIGOmull haft fein weiß 20m x 10cm | 6 Stück  | 00049584 |
| 60004   | TRIGOmull haft fein blau 20m x 6cm  | 6 Stück  | 00049590 |
| 60005   | TRIGOmull haft fein blau 20m x 8cm  | 6 Stück  | 00049609 |
| 60006   | TRIGOmull haft fein blau 20m x 10cm | 6 Stück  | 00049621 |
| 60007   | TRIGOmull haft fein rot 20m x 6cm   | 6 Stück  | 00050009 |
| 60008   | TRIGOmull haft fein rot 20m x 8cm   | 6 Stück  | 00050185 |
| 60009   | TRIGOmull haft fein rot 20m x 10cm  | 6 Stück  | 00051173 |
| <b>Quer- und längselastische Klebebinde</b>                 |                                     |          |          |
| 54106   | TRIGO RS-TP 2,5m x 6cm              | 10 Stück | 09944808 |
| 54108   | TRIGO RS-TP 2,5m x 8cm              | 10 Stück | 09944814 |
| 54110   | TRIGO RS-TP 2,5m x 10cm             | 10 Stück | 09944783 |
| <b>Längselastische Klebebinde</b>                           |                                     |          |          |
| 55606   | TRIGO RS-TM blau 2,5m x 6cm         | 10 Stück | 13153395 |
| 55608   | TRIGO RS-TM blau 2,5m x 8cm         | 10 Stück | 13153426 |
| 55610   | TRIGO RS-TM blau 2,5m x 10cm        | 10 Stück | 13153432 |
| 55506   | TRIGO RS-TM rot 2,5m x 6cm          | 10 Stück | 13153343 |
| 55508   | TRIGO RS-TM rot 2,5m x 8cm          | 10 Stück | 13153372 |
| 55510   | TRIGO RS-TM rot 2,5m x 10cm         | 10 Stück | 13153389 |
| 55406   | TRIGO RS-TM weiß 2,5m x 6cm         | 10 Stück | 13153314 |
| 55408   | TRIGO RS-TM weiß 2,5m x 8cm         | 10 Stück | 13153320 |
| 55410   | TRIGO RS-TM weiß 2,5m x 10cm        | 10 Stück | 13153337 |
| <b>Elastische Zinkleim-Kühlbinde</b>                        |                                     |          |          |
| 45056   | TRIGOzink cool 5m x 6cm             | 10 Stück | 11104524 |
| 45058   | TRIGOzink cool 5m x 8cm             | 10 Stück | 11104530 |
| 45051   | TRIGOzink cool 5m x 10cm            | 10 Stück | 11104547 |
| <b>Elastische Zinkleimbinde</b>                             |                                     |          |          |
| 10805   | TRIGOzink 5m x 10cm                 | 10 Stück | 09945535 |
| 10807   | TRIGOzink 7m x 10cm                 | 10 Stück | 09945541 |
| 10810   | TRIGOzink 10m x 10cm                | 10 Stück | 09945529 |

| Art-N°  | Bezeichnung                  | VE       | PZN      |
|---|------------------------------|----------|----------|
| <b>Elastische Idealbinde</b>                    |                              |          |          |
| 10406   | TRIGOideal weiß 5m x 6cm     | 10 Stück | 09945280 |
| 10408   | TRIGOideal weiß 5m x 8cm     | 10 Stück | 09945297 |
| 10410   | TRIGOideal weiß 5m x 10cm    | 10 Stück | 09945245 |
| <b>Elastische Mullfixierbinde</b>               |                              |          |          |
| 61602   | TRIGOmull fein 4m x 8cm      | 20 Stück | 09945400 |
| 61603   | TRIGOmull fein 4m x 10cm     | 20 Stück | 09945392 |
| <b>Langzugbinde zur Kompression</b>             |                              |          |          |
| 22006   | TRIGOlan 7m x 6cm            | 10 Stück | 09945334 |
| 22008   | TRIGOlan 7m x 8cm            | 10 Stück | 09945340 |
| 22010   | TRIGOlan 7m x 10cm           | 10 Stück | 09945311 |
| 22012   | TRIGOlan 7m x 12cm           | 10 Stück | 09945328 |
| <b>Kurzzugbinde zur Kompression</b>             |                              |          |          |
| 21006   | TRIGOband 5m x 6cm           | 10 Stück | 09944889 |
| 21008   | TRIGOband 5m x 8cm           | 10 Stück | 09944895 |
| 21010   | TRIGOband 5m x 10cm          | 10 Stück | 09944866 |
| 21012   | TRIGOband 5m x 12cm          | 10 Stück | 09944872 |
| <b>Schlauchbandage mit leichter Kompression</b> |                              |          |          |
| 91005   | TRIGOlast Gr. E 10m x 8,75cm | 1 Rolle  | 09945386 |
| 91006   | TRIGOlast Gr. F 10m x 10cm   | 1 Rolle  | 09945357 |
| 91007   | TRIGOlast Gr. G 10m x 12cm   | 1 Rolle  | 09945363 |
| <b>Dauerelastischer Schlauchverband</b>         |                              |          |          |
| 92003   | TRIGOtubiquick 10m x 8cm     | 1 Stück  | 18001916 |
| 92004   | TRIGOtubiquick 10m x 10,75cm | 1 Stück  | 18001922 |

# TRIGO RS-TK

Kohäsive Universal-Kompressionsbinde

LATEXFREI

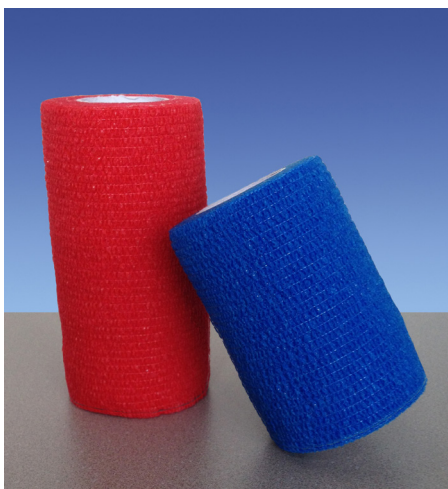

TRIGO RS-TK ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen und sorgt für eine kontrollierte Kompression. Die Binde ist wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden. TRIGO RS-TK lässt sich einfach und gerade reißen, so dass keine Schere benötigt wird. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf Haut und Haaren, hat eine sehr gute Luftdurchlässigkeit, ist wasserabweisend, leicht und komfortabel.

## Bestellinfos

Länge: ca. 4,5m gedehnt, 10 Stück je Packung

| Art-N° | Farbe | Breite | PZN      |
|--------|-------|--------|----------|
| 52702  | blau  | 2,5cm  | 17514737 |
| 52705  | blau  | 5cm    | 11192362 |
| 52708  | blau  | 7,5cm  | 10818339 |
| 52710  | blau  | 10cm   | 10818351 |
| 52008  | rot   | 7,5cm  | 10818233 |
| 52010  | rot   | 10cm   | 10818285 |

# TRIGOmull haft

Kohäsive, elastische Fixierbinde, feine Struktur



TRIGOmull haft ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschnüren und ist dabei wirtschaftlich, da nur sehr wenig Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt. Erhältlich in den Farben: weiß, blau und rot.

## Bestellinfos

Länge: ca. 20m gedehnt, 6 Stück je Packung

| Art-N° | Farbe | Breite | PZN      |
|--------|-------|--------|----------|
| 60001  | weiß  | 6cm    | 00049472 |
| 60002  | weiß  | 8cm    | 00049489 |
| 60003  | weiß  | 10cm   | 00049584 |
| 60004  | blau  | 6cm    | 00049590 |
| 60005  | blau  | 8cm    | 00049609 |
| 60006  | blau  | 10cm   | 00049621 |
| 60007  | rot   | 6cm    | 00050009 |
| 60008  | rot   | 8cm    | 00050185 |
| 60009  | rot   | 10cm   | 00051173 |

# TRIGO RS-TP

## Quer- und längselastische Klebebinde



TRIGO RS-TP ist eine längs- und querelastische, hautfarbene Klebebinde mit einem latexfreien, hypoallergenen Haftauftrag. Die Dehnung beträgt in Längsrichtung ca. 60% und in Querrichtung ca. 30%. TRIGO RS-TP lässt sich leicht abrollen und gibt sicheren Halt ohne zu verrutschen.

### Bestellinfos

Länge: ca. 2,5m ungedehnt, 10 Stück je Packung

| Art-N° | Breite | PZN      |
|--------|--------|----------|
| 54106  | 6cm    | 09944808 |
| 54108  | 8cm    | 09944814 |
| 54110  | 10cm   | 09944783 |

# TRIGO RS-TM

## Längselastische Klebebinde



TRIGO RS-TM ist eine leichte längselastische Klebebinde mit einem latexfreien, hypoallergenen Haftauftrag. Die Dehnung beträgt ca. 80%. TRIGO RS-TM lässt sich leicht abrollen und gibt sicheren Halt ohne zu verrutschen. Erhältlich in drei Farben.

### Bestellinfos

Länge: ca. 2,5m ungedehnt, 10 Stück je Packung

| Art-N° | Farbe | Breite | PZN      |
|--------|-------|--------|----------|
| 55606  | blau  | 6cm    | 13153395 |
| 55608  | blau  | 8cm    | 13153426 |
| 55610  | blau  | 10cm   | 13153432 |
| 55506  | rot   | 6cm    | 13153343 |
| 55508  | rot   | 8cm    | 13153372 |
| 55510  | rot   | 10cm   | 13153389 |
| 55406  | weiß  | 6cm    | 13153314 |
| 55408  | weiß  | 8cm    | 13153320 |
| 55410  | weiß  | 10cm   | 13153337 |

# TRIGOzink cool

## Elastische Zinkleim-Kühlbinde



TRIGOzink cool kombiniert durch ihre verbesserte Rezeptur die sehr guten Eigenschaften einer Zinkleimbinde und einer Kühlbinde. TRIGOzink cool ist universell einsetzbar für die schnelle und effektive Erste Hilfe und optimal geeignet für den niedergelassenen Bereich wie Traumatologie/Orthopädie, Phlebologie, Veterinärmedizin, Hausärzte, Dermatologen, Sportmediziner.

### Bestellinfos

*Länge: ca. 5m gedehnt, 10 Stück je Packung*

| Art-N° | Breite | PZN      |
|--------|--------|----------|
| 45056  | 6cm    | 11104524 |
| 45058  | 8cm    | 11104530 |
| 45051  | 10cm   | 11104547 |

# TRIGOzink

## Elastische Zinkleimbinde



TRIGOzink ist gebrauchsfertig zur zeitsparenden Anwendung. Sie ermöglicht ein einfaches und faltenfreies Anmodellieren des Verbandes. Einzeln versiegelt.

### Bestellinfos

*Breite: ca. 10cm ungedehnt, 10 Stück je Packung*

| Art-N° | Länge   | PZN      |
|--------|---------|----------|
| 10805  | ca. 5m  | 09945535 |
| 10807  | ca. 7m  | 09945541 |
| 10810  | ca. 10m | 09945529 |



# TRIGOideal

## Elastische Idealbinde



TRIGOideal ist eine dauerelastische und strapazier-fähige Idealbinde mit einem großen Anwendungsbereich. TRIGOideal schmiegt sich gut an und garantiert einen festen und dauerhaften Sitz. Trotz des dichten Gewebes ist diese Binde luftdurchlässig und dank des hohen Baumwollanteils sehr hautverträglich.

### Bestellinfos

*Länge: ca. 5m gedehnt, 10 Stück je Packung*

| Art-N° | Farbe | Breite | PZN      |
|--------|-------|--------|----------|
| 10406  | weiß  | 6cm    | 09945280 |
| 10408  | weiß  | 8cm    | 09945297 |
| 10410  | weiß  | 10cm   | 09945245 |

# TRIGOmull fein

## Elastische Mullfixierbinde



TRIGOmull fein ist eine elastische Mullbinde zum Fixieren von Kompressen und Salbenverbänden aller Art. Angenehmer Tragekomfort für den Patienten durch sehr weiche, anschmiegsame und luftdurchlässige Gewebestruktur. Gefertigt nach DIN 61634.

### Bestellinfos

*Länge: ca. 4m gedehnt, 20 Stück je Packung*

| Art-N° | Breite | PZN      |
|--------|--------|----------|
| 61602  | 8cm    | 09945400 |
| 61603  | 10cm   | 09945392 |

# TRIGOLan

## Langzugbinde zur Kompression



TRIGOLan ist eine dauerelastische, hautfarbene Langzugbinde. Die Binde ist hautfreundlich, atmungsaktiv und waschbar. Die Kompressionswirkung kann indikationsspezifisch durch die Wickeltechnik dosiert werden. Mit Verbandklammern.

### Bestellinfos

Länge: ca. 7m gedehnt, 10 Stück je Packung

| Art-N° | Breite | PZN      |
|--------|--------|----------|
| 22006  | 6cm    | 09945334 |
| 22008  | 8cm    | 09945340 |
| 22010  | 10cm   | 09945311 |
| 22012  | 12cm   | 09945328 |

# TRIGOband

## Kurzzugbinde zur Kompression



TRIGOband ist eine hautfreundliche, hautfarbene Kurzzugbinde aus 100% Baumwolle. Auch nach längerem Tragen und mehrmaligem Waschen behält die Binde ihre Elastizität bei. Unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß. Fixierte Bindendenenden verhindern das Ausfransen. Mit Verbandklammern.

### Bestellinfos

Länge: ca. 5m gedehnt, 10 Stück je Packung

| Art-N° | Breite | PZN      |
|--------|--------|----------|
| 21006  | 6cm    | 09944889 |
| 21008  | 8cm    | 09944895 |
| 21010  | 10cm   | 09944866 |
| 21012  | 12cm   | 09944872 |

# TRIGOlast

## Schlauchbandage mit leichter Kompression



TRIGOlast ist eine dauerelastische Schlauchbandage mit hoher Elastizität und gleichmäßiger Druckwirkung. Der Verband ist schnell und einfach anzulegen und aufgrund des hohen Baumwollanteils gut hautverträglich. Besonders geeignet für komprimierende Fixierverbände, z.B. nach Thorax- oder Abdomen-Operationen sowie zum Stützen und Entlasten an Gelenken, Bändern und Sehnen.

### Bestellinfos

Länge: ca. 10m ungedehnt, 1 Rolle je Packung

| Art-N° | Größe | Breite  | Anwendung          | PZN      |
|--------|-------|---------|--------------------|----------|
| 91005  | E     | 8,75cm  | Arme, Beine, Knie  | 09945386 |
| 91006  | F     | 10,00cm | Oberschenkel, Knie | 09945357 |
| 91007  | G     | 12,00cm | gr. Oberschenkel   | 09945363 |

# TRIGOtubiquick

## Dauerelastischer Schlauchverband



TRIGOtubiquick ist ein nahtlos gewirkter Schlauchverband mit angenehmen Trageeigenschaften. Der Trikotschlauch lässt sich auf ein Vielfaches seiner Breite dehnen und verengt sich wieder beim Zusammenziehen. Ein farbiger Kennstreifen dient der Größenkennzeichnung.

### Bestellinfos

Länge: ca. 10m gedehnt, 1 Rolle je Packung

| Art-N° | Größe | Breite  | Anwendung             | PZN      |
|--------|-------|---------|-----------------------|----------|
| 92003  | 3     | 8,0cm   | große Gliedmaßen      | 18001916 |
| 92004  | 4     | 10,75cm | sehr große Gliedmaßen | 18001922 |

# Bestellfax



Bestellungen per Fax: 089 - 7550 5689  
oder Email: info@miv-ag.de

Praxis: \_\_\_\_\_

Lieferanschrift:  wie Praxis

Name: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Bestellnummer: \_\_\_\_\_

| Art-N° oder PZN | Artikel Bezeichnung | Menge der VE |
|-----------------|---------------------|--------------|
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |
|                 |                     |              |

|       |                           |              |
|-------|---------------------------|--------------|
| Datum | Stempel (falls vorhanden) | Unterschrift |
|-------|---------------------------|--------------|

Haben Sie Fragen zu den Produkten?  
Bitte sprechen Sie uns an!



Management AG für  
Integrierte Versorgung  
Aidenbachstraße 52a  
81379 München

Tel: 089-75075592  
Fax: 089-75505689  
www.miv-ag.de  
info@miv-ag.de

